



Chemical Indicators

米国レーベン社製ケミカル・インディケータは豊富な経験と安定した品質で、米国内の使用者から喜ばれています。米国レーベン社製ケミカル・インディケータの製品総称は ProChem (プロケム) で、製品は豊富に揃えております。これらの製品は米国 FDA の 510K の承認を取得しております。

ProChem インテグレート・テープ

AAMI、EN 並びに ISO 規格に合致

滅菌過程のコントロールで滅菌機が機能したか否かの判定に使用します。滅菌対象物を包装し滅菌する場合に封印する様にご使用ください。



有効期限：製造後 2 年

* 高圧蒸気滅菌機用

132~134℃ 2分又は121℃ 10分で白色から黒色に色調変化します。

* EOG 滅菌機用

Gas 濃度 600mg/L、蒸気 40~60%、温度 54℃、時間 45 分で茶色から緑色に色調変化します。

* 高圧蒸気滅菌機用

CI-STP-12-72 12 mm×50m 72Rolls/箱

CI-STP-18-48 18 mm×50m 48Rolls/箱

CI-STP-24-36 24 mm×50m 36Rolls/箱

* EOG 滅菌機用

CI-ETP-18-48 18 mm×50m 48Rolls/箱

ProChem インテグレート

AAMI、EN867-1/2 の Class D 並びに ISO1140-1 の Class 5 の規格に合致



パック内に各々のパラメーターが機能したか否かの判定に使用します。

* 高圧蒸気滅菌機用

温度、蒸気及び時間の条件が満たされている場合に白色から黒色に色調変化します。

サイズ：15 mm×195 mm

最小包装単位：250 枚/箱

有効期限：製造後 5 年

Cat.No.CI-SINT

132~135℃ 3 分で白色から黒色に色調変化します。

ProChem インテグレート

AAMI、EN867-1/2 の Class D 並びに ISO1140-1 の Class 5 の規格に合致

パック内に各々のパラメーターが機能したか否かの判定に使用します。

* EOG 滅菌機用

サイズ：15 mm×95 mm

最小包装単位：250 枚/箱

有効期限：製造後 2 年

Cat.No.CI-EOINT

Gas 濃度 600 mg/L、蒸気 40~60%、温度 54℃、時間 45 分で薄茶色から茶色に色調変化します。

ProChem DHI ラベル



* 乾熱滅菌機用

滅菌対象全てに DHI ラベルを貼り付けて下さい。容易に貼り付けられる様に裏面に糊が付いています。

最小包装単位：1000 枚/箱


有効期限：製造後 2 年

Cat.No.CI-DHI

乾熱滅菌機用で、160℃ 10 分で緑色から黒色に色調変化します。

ProChem バキューム・テストパック

AAMI、EN867-3 並びに ISO1140 の規格に合致

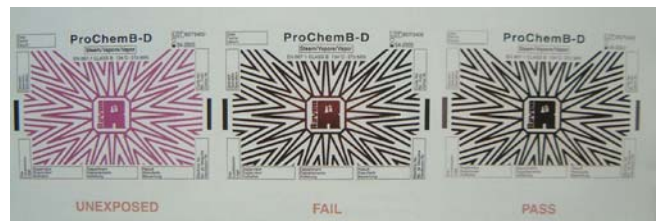

ご使用されている滅菌機に 1 日 1 回、滅菌機の機能をすばやく判定するのに使用します。テストパックを滅菌機庫内を空の状態、排気口を避け、ドアサイドで滅菌機の最前部の一番下に置いて使用してください。134℃、3~3.5 分で黒色に色調変化します。

Cat.No.CI-BDTLF 最小包装単位：80 袋/箱

有効期限：製造後 2 年

ProChem バキューム・テストシート



Cat.No.CI-BDS

最小包装単位：100 枚/箱

有効期限：製造後 2 年

